

Certains médicaments ou certains états pathologiques peuvent avoir une incidence sur le résultat du test de grossesse.

- Avant d'effectuer le test, lisez toujours les instructions du fabricant concernant les médicaments que vous prenez.
- Les inducteurs d'ovulation contenant l'hormone hCG peuvent fausser les résultats. Ces traitements sont habituellement administrés par injection et un test effectué trop rapidement après l'injection peut donner un résultat faux positif « Enceinte ».
- D'autres traitements de l'infertilité, les analgésiques et les contraceptifs hormonaux (p. ex. les pilules contraceptives) ne devraient pas nuire au résultat.
- Si vous avez récemment arrêté de prendre une contraception hormonale ou si vous prenez un traitement de l'infertilité, votre cycle peut être irrégulier, ce qui peut vous amener à effectuer le test trop tôt.
- Si vous avez été enceinte récemment (même si la grossesse n'a pas été menée à terme), il est possible que vous obteniez un résultat faux positif « Enceinte ».
- Une grossesse extra-utérine, un kyste de l'ovaire, la ménopause ou de très rares états pathologiques peuvent fausser le résultat.
- Si vous obtenez un résultat « Enceinte », il est possible que vous découvriez plus tard que vous n'êtes pas enceinte en raison d'une fausse couche pouvant survenir en tout début de grossesse.

Si vous obtenez des résultats inattendus, il est conseillé d'en parler à votre médecin.

Le Moniteur de fertilité Clearblue Avancé vous permet de savoir si vous êtes enceinte en détectant l'hormone de grossesse, hCG, dans votre urine. Des tests en laboratoire ont démontré qu'il est précis à plus de 99 % pour détecter la grossesse à la date prévue des règles.

Clearblue vous conseille de commencer les tests à la date prévue de vos règles. Toutefois, la concentration de l'hormone de grossesse augmente rapidement en tout début de grossesse et vous pouvez utiliser le Moniteur de fertilité Clearblue Avancé jusqu'à trois jours avant la date prévue de vos règles. Voici les résultats des essais cliniques effectués sur des échantillons prélevés en tout début de grossesse avec le Moniteur de fertilité Clearblue Avancé :

Nombre de jours avant la date prévue des règles	% d'échantillons de femmes enceintes donnant le résultat « Enceinte »
-1	96 %
-2	91 %
-3	74 %

Clearblue[™]

Moniteur de fertilité
Avancé
Tests de grossesse



Ces tests ne doivent être utilisés qu'avec un Moniteur de fertilité Clearblue Avancé. Ils ne fonctionnent avec aucun autre mini-ordinateur Clearblue. Vous devez lire les instructions fournies avec le mini-ordinateur avant d'utiliser ces tests. Si vous utilisez le mini-ordinateur pour la première fois, il vous faudra définir un nouveau cycle avant de faire un test de grossesse.

Si vous avez perdu les instructions de votre mini-ordinateur, vous pourrez en obtenir d'autres en composant le numéro de la ligne d'assistance Clearblue ou en les téléchargeant sur www.clearblue.com.

À quel point le Moniteur de fertilité Clearblue Avancé est-il précis?

Des essais en laboratoire ont démontré que le Moniteur de fertilité Clearblue Avancé est précis à plus de 99 % pour détecter la grossesse dès la date prévue des règles.

Santé Canada conseille aux femmes enceintes d'éviter de consommer de l'alcool pendant la grossesse parce que les effets de l'alcool peuvent poser un risque au bébé, comme le Syndrome d'alcoolisme foetal (SAF). Vous trouverez de plus amples renseignements sur www.hc-sc.gc.ca.

www.clearblue.com


Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h, HNE.

1-888-698-5039 Appel gratuit depuis téléphone fixe. Veuillez vous munir du produit, de la boîte ainsi que des papiers d'emballage lors de votre appel. Les appels sont enregistrés à des fins de formation et de contrôle de la qualité.

Résultat de votre test de grossesse



Si votre résultat indique « Enceinte », vous devez consulter votre médecin qui pourra vous conseiller sur les étapes suivantes.

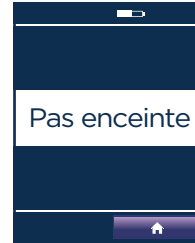

Votre résultat indique « Pas enceinte ». Il se peut que vous ne soyez pas enceinte ou, si vous avez effectué le test avant la date prévue de vos règles, il se peut que la concentration de l'hormone de grossesse ne soit pas assez élevée pour être détectée. Effectuez à nouveau le test à la date prévue de vos règles.

Si vous obtenez à nouveau le résultat « Pas enceinte » à la date prévue de vos règles, refaites un test trois jours plus tard. Si vous obtenez à nouveau le résultat « Pas enceinte » et si vous n'avez toujours pas eu vos règles, consultez votre médecin.

Erreurs pendant le test

En cas d'erreur pendant le test, l'écran affiche un message d'erreur. Pour en savoir davantage, consultez le manuel d'instruction du mini-ordinateur.

Fabricant : SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD), Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Genève, Suisse. Clearblue est une marque de commerce de SPD. ©2019 SPD. Tous droits réservés.

Pour usage personnel à domicile.

Pour usage diagnostique *in vitro*.

Réservé à un usage externe.

Ne pas réutiliser les bâtonnets-tests.

Tenir hors de la portée des enfants.

Conservé entre 2 et 30 °C.

Amener à température ambiante pendant 30 minutes si réfrigéré.

Ne pas utiliser le bâtonnet-test si la pochette protectrice est endommagée. Ne pas utiliser un bâtonnet-test après la date limite d'utilisation.

505151-11 09-2019

Comment faire le test

Le mini-ordinateur ne demandera que des tests de fertilité. Il estimera la date de vos règles, mais vous pouvez faire le test de grossesse chaque jour à condition d'avoir défini un cycle. Vous pouvez faire le test une fois pendant votre plage horaire. Toutefois, en cas d'erreur, vous pourrez recommencer à l'aide d'un nouveau test. Si vous souhaitez recueillir votre échantillon d'urine plus tard, par exemple si vous devez aller aux toilettes avant le début de votre plage horaire, utilisez un récipient propre et sec et laissez-le à la température ambiante jusqu'à ce que vous soyez prête à faire le test. N'oubliez pas que vous devez effectuer le test pendant la plage horaire.


- 1 Lorsque vous êtes prête, sélectionnez le bon test de grossesse, soit celui se trouvant dans un emballage blanc.



- 2 Ouvrez l'emballage. Sortez-en le test et utilisez-le immédiatement.



Ne pointez pas l'extrémité absorbante vers le haut, sous peine de fausser les résultats.

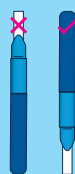

- 3 Choisissez votre méthode de test :

Sous votre jet d'urine

Maintenez seulement l'extrémité absorbante orientée vers le bas sous votre jet d'urine pendant **3 secondes seulement.**




OU

Par imbibition


Recueillez un échantillon d'urine dans un récipient propre et sec et immergez-y l'extrémité absorbante, comme illustré, pendant **15 secondes seulement.**



- 4 Retirez le capuchon.

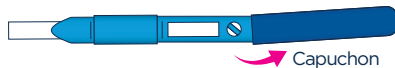


- 5 Placez le capuchon sur l'extrémité absorbante. Essuyez le surplus d'urine.

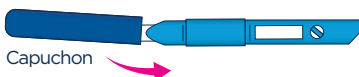



- 6 Insérez immédiatement le test dans le mini-ordinateur. Si le mini-ordinateur est éteint, rallumez-le et attendez que l'écran Clearblue disparaisse avant d'insérer le test.

- 7 Localisez la fente d'insertion.

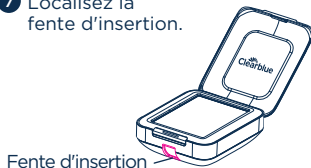


- 8 Tenez le mini-ordinateur à plat ou posez-le sur une surface plane.

- 9 Insérez le test en plaçant le coin biseauté sur le rebord du bas et le côté coloré à droite de la fente d'insertion.

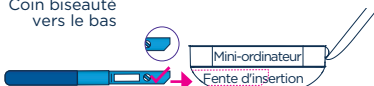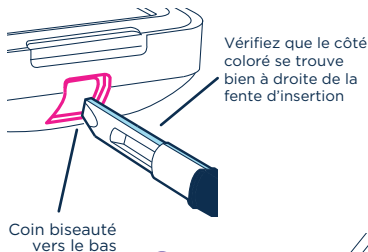

- 10 Poussez le test jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ».

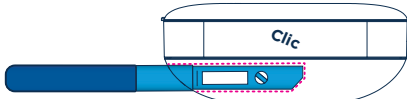

À NE PAS FAIRE

N'insérez pas l'extrémité absorbante dans le mini-ordinateur.



N'insérez pas un test en tenant le coin biseauté vers le haut.



N'insérez pas le capuchon dans le mini-ordinateur.



- 11 Le mini-ordinateur confirme que le test est bien inséré et détermine s'il s'agit d'un test de fertilité ou de grossesse. Une fois le processus terminé, un décompte commence à l'écran.



Ne retirez pas le test pendant le décompte. Si vous retirez le test trop rapidement, une erreur s'affichera.

L'écran s'éteint au bout d'une minute, mais le mini-ordinateur poursuit l'analyse. Le voyant de test clignote.

- 12 Attendez 5 minutes pour obtenir le résultat.

- 13 Si vous rallumez le mini-ordinateur, l'écran indique le temps qu'il vous reste à attendre. L'alarme sonne lorsque le test est terminé, et le voyant arrête de clignoter.

- 14 Si le mini-ordinateur est éteint, rallumez-le et retirez le test.

- 15 Lisez votre résultat. Le résultat ne se lit que sur le mini-ordinateur et n'est en aucun cas déterminé par les lignes pouvant apparaître sur le test.

- 16 Jetez le test avec les ordures ménagères habituelles. Il ne faut jamais réutiliser un test.