

# Clearblue™

## Test de grossesse

Détection ultra précoce

Ce mode d'emploi est destiné au Test de grossesse Clearblue Détection ultra précoce. Les instructions au verso de la notice sont destinées au Test de grossesse Clearblue avec Indicateur de semaines fourni avec une pochette protectrice sur laquelle figure la mention « DIGITAL ».

- Précis à plus de 99 % à partir de la date prévue des règles.
- **Veuillez lire cette notice attentivement avant d'effectuer un test.**

### 1 Quand faire le test

Capuchon Tige indicatrice de couleur



- Effectuez le test jusqu'à 6 jours avant l'absence de vos règles, ce qui correspond à 5 jours avant la date prévue de vos règles.
- Si vous faites un test avant la date prévue de vos règles, utilisez votre première urine au réveil. Autrement, vous pouvez faire un test à n'importe quel moment de la journée.
- Évitez de trop boire avant de faire le test.

### 2 Faites le test

A



#### JET D'URINE

Vous devez maintenir la tige indicatrice de couleur sous votre jet d'urine pendant cinq secondes complètes.



- Retirez le bâtonnet-test de sa pochette protectrice et enlevez le capuchon. **Utilisez le bâtonnet-test immédiatement.**

#### Choisissez votre méthode de test

- **IMPORTANT : La tige indicatrice de couleur deviendra rapidement rose, indiquant que l'urine est absorbée.**

OU

B



#### ÉCHANTILLON RECUEILLI

Commencez à compter 20 secondes à partir du moment où la tige indicatrice de couleur devient rose.



Immergez uniquement la tige

- A Maintenez la tige indicatrice de couleur sous votre jet d'urine pendant cinq secondes complètes.

OU

- B Immergez complètement la tige seulement dans un échantillon de votre urine recueilli dans un récipient propre et sec pendant 20 secondes complètes.

- Si la tige indicatrice de couleur ne devient pas complètement rose, reportez-vous à la question 7.
- Remettez le capuchon et posez le bâtonnet-test à plat.
- Commencez à compter.

3 minutes

## ATTENDEZ 3 MINUTES COMPLÈTES avant de lire le résultat

### 3 Lisez votre résultat



- Une ligne pourrait apparaître rapidement dans la fenêtre de contrôle, mais vous **DEVEZ** attendre 3 minutes avant de lire le résultat. Si vous ne voyez pas de ligne bleue dans la fenêtre de contrôle, c'est que le test n'a pas fonctionné (reportez-vous à la question 8).

#### PAS ENCEINTE



Image A

#### SI VOUS VOYEZ DEUX LIGNES, C'EST QUE VOUS ÊTES ENCEINTE



Image B



Image C



Image D

PEU IMPORTE SI LES LIGNES SONT PLUS PÂLES OU PLUS FONCÉES.

- Si votre résultat est « Pas Enceinte », reportez-vous à la question 4.
- Si votre résultat est « Enceinte », reportez-vous à la question 3.
- Si vous êtes toujours incertaine de votre résultat, reportez-vous à la question 9.

**IMPORTANT!** Lisez votre résultat dans les **10 minutes** suivant l'exécution d'un test. Ne tenez pas compte de tout changement du résultat après ce laps de temps.

## ? Questions et réponses

### 1 Comment fonctionne Clearblue?

Lorsque vous êtes enceinte, votre organisme sécrète l'hormone de grossesse hCG (gonadotrophine chorionique humaine). Ce test est capable de détecter des quantités infimes de hCG dans votre urine (sa sensibilité est de 10 mIU/ml).

### 2 Quand puis-je effectuer un test avec le test de grossesse Clearblue Détection ultra précoce?

Vous pouvez effectuer un test jusqu'à 6 jours avant l'absence de vos règles, ce qui correspond à 5 jours avant la date prévue de vos règles. Si vous effectuez le test avant la date prévue de vos règles et obtenez le résultat « Pas enceinte », il est tout de même possible que vous soyez enceinte. Reportez-vous au tableau ci-dessous pour connaître les résultats des tests en laboratoire effectués sur des échantillons prélevés en tout début de grossesse.

#### Test précoce

Nombre de jours avant la date prévue des règles	% d'échantillons d'urine de femmes enceintes ayant donné un résultat « Enceinte »
0	>99 %
1	>99 %
2	>99 %
3	>99 %
4	96 %
5	79 %

### 3 Mon test indique que je suis enceinte. Que dois-je faire?

Vous devez consulter votre médecin, qui pourra vous conseiller sur les étapes suivantes.

### 4 Mon test indique que je ne suis pas enceinte, mais je pense que je pourrais l'être quand même. Que dois-je faire?

Il est possible que vous ne soyez pas enceinte, que la concentration d'hormone hCG ne soit pas encore assez élevée pour être détectée ou que vous ayez mal calculé la date prévue de vos règles. Si vous avez fait un test avant la date prévue de vos règles, refaites un test à la date prévue de vos règles. Si vos règles sont en retard, attendez trois jours et refaites un test. Si vous obtenez à nouveau le résultat « Pas enceinte » et si vous n'avez toujours pas eu vos règles, consultez votre médecin.

### 5 J'ai effectué le test auparavant et le résultat indiquait « Enceinte », mais j'ai de nouveau effectué le test et le résultat indiquait « Pas Enceinte », ou j'ai eu mes règles. Qu'est-ce que cela signifie?

Bien que le test soit précis à plus de 99 % pour détecter l'hormone de grossesse à la date prévue de vos règles, il est possible d'obtenir un résultat « Enceinte », pour découvrir plus tard que vous n'êtes pas enceinte (p.ex. vous pouvez éventuellement obtenir un résultat « Pas enceinte », ou vous pouvez avoir vos règles). Cela peut être causé par une fausse-couche aux premiers stades de la grossesse, également connu sous le nom de « fausse-couche en tout début de grossesse », qui est malheureusement un phénomène commun, puisqu'environ 1 grossesse sur 4 se termine en fausse-couche en tout début de grossesse. Si vous obtenez des résultats inattendus, consultez votre médecin.

### 6 Certains médicaments ou certains états pathologiques peuvent-ils avoir une incidence sur le résultat?

Avant d'effectuer un test, lisez toujours les instructions du fabricant concernant les médicaments que vous prenez. Les médicaments contenant l'hormone hCG peuvent affecter le résultat. Une grossesse extra-utérine ou une grossesse récente, même si elle n'a pas été menée à terme, peut donner des résultats inexactes. Si vous êtes en période de ménopause ou que vous vous en approchez, vous pouvez obtenir un résultat faux positif « Enceinte », même si vous n'êtes pas enceinte. Les thérapies hormonales contenant du citrate de clomifène, les analgésiques, l'alcool, les antibiotiques et la pilule contraceptive ne devraient pas affecter le résultat du test. Si vous obtenez des résultats inattendus, parlez-en à votre médecin.

### 7 Lorsque j'ai utilisé le test, la tige indicatrice de couleur n'est pas devenue complètement rose. Que dois-je faire?

Vous n'avez peut-être pas suffisamment imbibé la tige d'urine. Cependant, si la ligne bleue apparaît malgré tout dans la fenêtre de contrôle au plus tard 10 minutes après la réalisation du test, alors le test a bien fonctionné. Si aucune ligne bleue n'apparaît dans la fenêtre de contrôle au plus tard 10 minutes après la réalisation du test, reportez-vous à la question 8.

### 8 J'ai utilisé le test, mais aucune ligne bleue n'est apparue dans la fenêtre de contrôle. Que dois-je faire?

Si plus de 10 minutes se sont écoulées depuis la réalisation du test, alors le test n'a pas fonctionné. Cela s'est peut-être produit parce que :

- la tige indicatrice de couleur n'a pas été maintenue orientée vers le bas ou le bâtonnet-test n'a pas été posé à plat après l'absorption d'urine;
- la tige indicatrice de couleur a été imbibée de trop ou trop peu d'urine.

Refaites un test, en utilisant un nouveau bâtonnet-test et en prenant soin de suivre les instructions. Si vous le souhaitez, vous pouvez recueillir un échantillon d'urine et faire le test à l'aide de la méthode « Échantillon recueilli ».

### 9 Que dois-je faire si je suis incertaine du résultat?

Reportez-vous aux images dans la section « Lisez votre résultat ».

#### Image A :

Votre résultat indique « Pas Enceinte ». Si vous pensez que vous pourriez être enceinte malgré tout, reportez-vous à la question 4.

#### Images B-D :

Votre résultat indique « Enceinte ». L'apparence de la ligne dans la fenêtre de résultat peut varier. Cependant, le résultat demeure « Enceinte », que la ligne soit plus pâle ou plus foncée.

**Image B :** Cela est plus probable lorsque vous effectuez un test avant la date prévue de vos règles, lorsque le taux de l'hCG est relativement faible.

**Image C :** Ce résultat est typique lorsque vous effectuez un test autour de la date prévue de vos règles.

**Image D :** Ce type de résultat apparaît dans le cas où vous effectuez le test plusieurs jours après la date prévue de vos règles, lorsque la concentration de l'hormone hCG est plus élevée.

Si vous êtes toujours incertaine de votre résultat, vous devriez attendre au moins trois jours avant de refaire un test. Assurez-vous de bien suivre les directives.

Des renseignements sur les étapes à suivre après avoir effectué le test ainsi que des renseignements et des conseils d'ordre général sont disponibles sur notre site Internet : [www.clearblue.com](http://www.clearblue.com)

Santé Canada conseille aux femmes enceintes d'éviter de consommer de l'alcool pendant la grossesse parce que les effets de l'alcool peuvent poser un risque au bébé, comme le Syndrome d'alcoolisme fœtal (SAF). Vous trouverez de plus amples renseignements sur [www.hc-sc.gc.ca](http://www.hc-sc.gc.ca).

Pour usage personnel à domicile. Pour usage diagnostique *in vitro*. Réservé à un usage externe. Ne pas réutiliser. Tenir hors de la portée des enfants. Conserver entre 2 et 30 °C. Laisser reposer à la température ambiante pendant 30 minutes avant l'utilisation si le test est conservé au réfrigérateur. Ne pas utiliser si la pochette protectrice est endommagée. Ne pas utiliser après la date limite d'utilisation. Jeter avec les ordures ménagères habituelles. Contient des pièces de petite taille. Ne pas ingérer les composants de cet appareil. En cas d'ingestion accidentelle, consulter un médecin. Signaler à Clearblue toute blessure causée par l'utilisation de ce produit.

## [www.clearblue.com](http://www.clearblue.com)

### Ligne Assistance Clearblue

Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h 00, HNE.

**1 888 698 5039** Appel gratuit depuis téléphone fixe.

Veillez vous munir du produit et de l'emballage comprenant la pochette d'aluminium lors de votre appel. Les appels sont enregistrés à des fins de formation et de contrôle de la qualité.

Fabricant: SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD), Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Genève, Suisse.

Clearblue est une marque de commerce de SPD.

© 2020 SPD. Tous droits réservés.

Le Test de grossesse Clearblue Détection ultra précoce est un test de hCG (gonadotrophine chorionique humaine) urinaire disponible sans ordonnance et destiné à détecter la grossesse. Le test peut être utilisé au plus tôt 5 jours avant la date prévue des règles (6 jours avant l'absence de règles).

P/N 506014-12 05-2020